


seca 834

Elektroniczna waga niemowlęca do użytku także jako waga płaska dla dzieci 



- Waga niemowlęca i płaska do ważenia dzieci w jednym.
- Proste zdejmowanie szalki z podstawy.
- Funkcja Breast Milk Intake (wypitego przez niemowlę mleka w czasie karmienia).
- Trwała, do użytku mobilnego.

seca 834:

Solidna a zmienna – kompaktowa jakość z podwójnym zastosowaniem.

W domu, w gabinecie i wszędzie tam, gdzie zaczyna się życie: niezawodna kontrola masy ciała jest decydująca dla zdrowego rozwoju. Z zebranych doświadczeń powstał wszechstronny talent – seca 834. Można ją stosować jako wagę dla niemowląt albo płaską wagę do ważenia małych dzieci.

Waga dla niemowląt i płaska waga dla dzieci w jednym.

W szalce wagi seca 834 niemowlę można ważyć w sposób bezpieczny i zarazem wygodny. Zaokrąglony kształt szalki i lekko podwyższone ścianki boczne dają poczucie bezpieczeństwa. Po zdjęciu szalki z podstawy, uzyskujemy w pełni funkcjonalną, elektroniczną wagę płaską, o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 20 kg.

Stała blokada szalki zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wystarczy jeden ruch, a waga dla niemowląt zmienia się w wagę płaską: wciśnięcie przycisku odłącza szalkę od podstawy. Stałe połączenie szalki z podstawą w stanie zablokowanym sprawia, że wagę dla niemowląt można bez problemu podnieść i bezpiecznie przetransportować.

Łatwa obsługa dzięki intuicyjnym funkcjom przycisków.

Przyciski funkcyjne rozmieszczono w sposób umożliwiający intuicyjną, a tym samym łatwą obsługę wagi seca 834. Dzięki funkcji HOLD można najpierw zająć się niemowłkiem, a dopiero później odczytać wynik ważenia. Funkcja TARA umożliwia uwzględnienie i odjęcie wagi pieluszek lub podkładek od wyniku ważenia. Funkcja Breast-Milk-Intake służy do określenia ilości mleka wypitego przez niemowlę podczas karmienia. Naciśnięcie przycisku pozwala zapisać masę niemowłcia przed karmieniem i następnie odjąć ją od aktualnego wyniku uzyskanego przy ponownym ważeniu.

Przenośna i solidna – na potrzeby transportu.

Kompaktowa i solidna konstrukcja sprawia, że seca 834 jest świetnym narzędziem pracy dla wszystkich, którzy w trosce o zdrowie najmłodszych muszą pozostawać mobilni. Energooszczędny tryb pracy na baterie – jeden zestaw baterii pozwala wykonać nawet 20.000 cykli ważenia – sprawia, że wagę można zastosować praktycznie wszędzie.



seca 414



seca 413



Szalka odłącza się od podstawy za jednym naciśnięciem przycisku.



seca 834

Dane techniczne

- Nośność: 20 kg
- Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.): 552 x 156 x 332 mm
- Wymiary powierzchni wagowej (szer. x wys. x gł.): 525 x 80 x 250 mm
- Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.): 280 x 65 x 235 mm
- Masa własna: 2,5 kg
- Zasilanie: bateryjne
- Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: torba seca 414 lub seca 413
- Klasa dokładności:



507 295 517
507 295 519



biuro@nowewagi.pl
serwis@nowewagi.pl



nowewagi.pl
medycznawagi.pl